

**Si vous  
utilisez ceci...**



**Protégez vos infirmières  
contre les piqûres d'aiguille.  
Utilisez des protecteurs  
d'aiguille UltraSafe<sup>®</sup>.**

**Nouveau  
Les protecteurs  
d'aiguille UltraSafe**

Les protecteurs d'aiguille UltraSafe s'attachent facilement aux seringues en verre préremplies d'héparines à bas poids moléculaire, de vaccins ou de médicaments issus de la biotechnologie. Les protecteurs d'aiguille UltraSafe—une protection efficace. Appelez-nous et nous nous chargeons du reste. Composez le +1.760.918.9908

**Ne prenez pas de risque.  
Utilisez les dispositifs  
anti-piqûres UltraSafe.**



## Protecteurs d'aiguille UltraSafe


- Protecteurs d'aiguille identifiables par un code couleur facilitant le choix de la bonne taille.
- Plastique très résistant, transparent, permettant d'identifier le médicament.
- Verrouillage à déclic offrant une confirmation audible et tactile de la mise en jeu du protecteur.
- Mise en jeu classique du protecteur coulissant et facilité d'assemblage permettant l'adhésion et la formation de l'utilisateur.



### Protecteur d'aiguille UltraSafe/Table de correspondance des médicaments


#### B50

A utiliser avec des seringues en verre pré-remplies de 0,5 ml conformes à la norme ISO, et des aiguilles d'une longueur maximale de 16 mm (5/8").

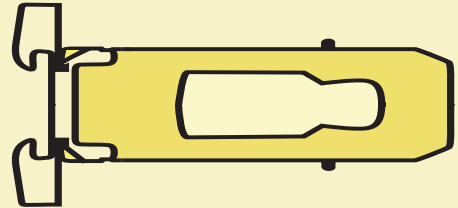


#### B100

A utiliser avec des seringues en verre pré-remplies de 1 ml conformes à la norme ISO, et des aiguilles d'une longueur maximale de 16 mm (5/8").

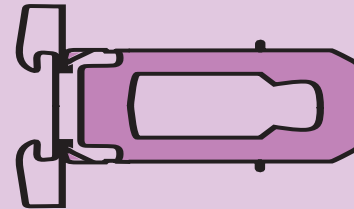


#### B100L

A utiliser avec des seringues en verre pré-remplies de 1 ml (longue) conformes à la norme ISO, et des aiguilles d'une longueur maximale de 16 mm (5/8").

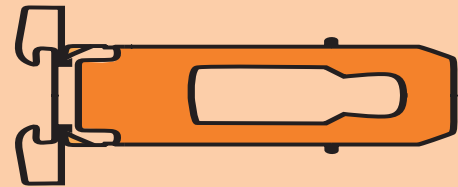


#### B150


A utiliser avec des seringues en verre pré-remplies de 1,5 ml conformes à la norme ISO, et des aiguilles d'une longueur maximale de 25 mm (1").

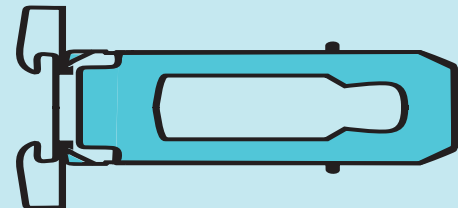


### Mode d'emploi

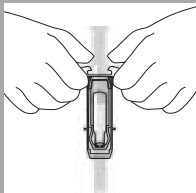

**Insérer et enclencher.**  
Insérer la seringue dans le protecteur jusqu'à ce que les ailettes s'enclenchent solidement. Ne pas pousser le piston pendant l'assemblage.

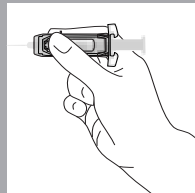

**Faire l'injection.**  
Faire l'injection selon le protocole standard.

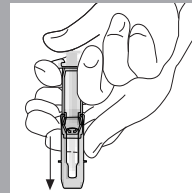

**Glisser la gaine protectrice sur l'aiguille.**  
Après l'injection, glisser la gaine protectrice sur l'aiguille avec la main libre. Le déclic indique la position correcte. **Les mains doivent toujours rester en arrière de l'aiguille.**

**Jeter l'ensemble.**  
Jeter l'ensemble seringue/protecteur dans un container pour objets pointus et tranchants approuvé pour cet usage.

