

**Wenn Sie Spritzen  
benutzen...**



**Schützen Sie Ihr Personal vor  
Nadelstichen. Verwenden  
Sie den UltraSafe<sup>®</sup>  
Nadelschutz.**

**Neu:  
UltraSafe  
Nadelschutz**

Der UltraSafe Nadelschutz kann einfach auf vorgefüllte Glasspritzen, die für niedrigmolekulare Heparine, Impfstoffe und biotechnische Medikamente verwendet werden, angebracht werden. UltraSafe Nadelschutz—ein Schutz, der wirklich funktioniert. Rufen Sie uns an, und wir erledigen den Rest. Wir sind zu erreichen unter +1.760.918.9908.

**Gehen Sie auf Nummer sicher.  
Verwenden Sie den UltraSafe  
Anti-Nadelstich-Schutz.**

## UltraSafe Nadelschutz


- Farbkodierte Schutzvorrichtungen zur einfachen Auswahl der richtigen Größe.
- Robuster transparenter Kunststoff ermöglicht das Erkennen der Beschriftung der Medikamente.
- Die Schutzaktivierung wird durch ein fühlbares und hörbares Einrasten beim Aufsetzen bestätigt.
- Die einfache Aktivierung des Nadelschutzes und der benutzerfreundliche Zusammenbau unterstützen die richtige Benutzung und das Erlernen.



### UltraSafe-Referenz für Nadelschutz/Medikamente


#### B50

Nur für den Gebrauch mit vorgefüllten 0,5 ml ISO-Standard-Glasspritzen mit einer Nadellänge von max. 16 mm (5/8").

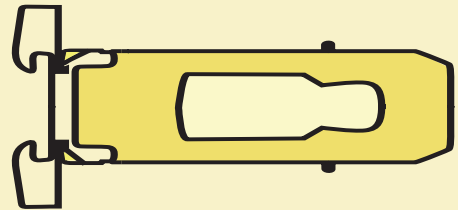


#### B100

Nur für den Gebrauch mit vorgefüllten 1,0 ml ISO-Standard-Glasspritzen mit einer Nadellänge von max. 16 mm (5/8").

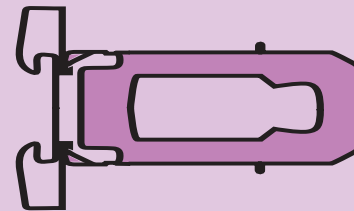


#### B100L

Nur für den Gebrauch mit vorgefüllten 1,0 ml ISO-Standard-Glasspritzen (lange Version) mit einer Nadellänge von max. 16 mm (5/8").

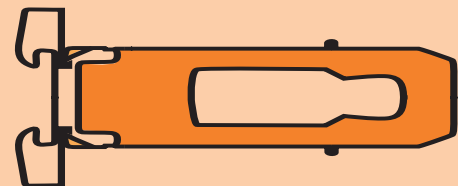


#### B150

Nur für den Gebrauch mit vorgefüllten 1,5 ml ISO-Standard-Glasspritzen mit einer Nadellänge von max. 25 mm (1").

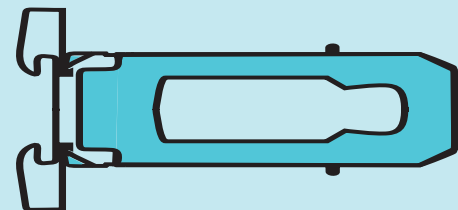


### Gebrauchsanleitung

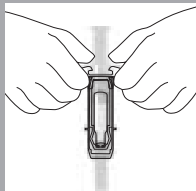


#### Einführen und einrasten lassen.

Die Spritze in den Nadelschutz einführen bis der Fingergriff sicher einrastet. Beim Zusammenbau den Kolben nicht herunterdrücken.

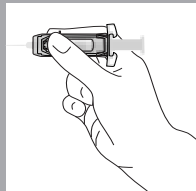

#### Injektion verabreichen.

Die Injektion gemäß Standardprotokoll verabreichen.

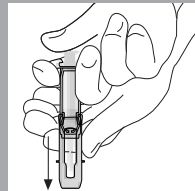

#### Nadelschutz über die Nadel schieben.

Nach der Injektion mit der freien Hand den Nadelschutz über die Nadel schieben. Ein hörbares Klicken zeigt die richtige Stellung an. **Die Hände müssen sich immer hinter der Nadel befinden.**

#### Entsorgen.

Spritze/Nadelschutz in einem Sonderbehälter für spitze Gegenstände entsorgen.

